

プラスチック
透明眼帯
アイカップシリーズ

術後の眼をガードする

プラスチック透明眼帯 “アイカップ”シリーズ

特長

- プラスチック製のため金属アレルギーの方も安心してお使いいただけます
- ディスプレイでの使用目的※のため衛生面で気にされる方も安心です
※ガス滅菌、オートクレープ滅菌(加圧式滅菌)実験済みです。121℃滅菌では変形等は見られませんが、121℃での複数回の滅菌や121℃以上の温度設定にてオートクレープを行った場合、劣化や変形の恐れがあるため、1回までの滅菌にてご使用いただくことをおすすめいたします。やむをえず再滅菌を行う場合はEOG滅菌をおすすめします。
- 透明のため、使用時も目立つことなく、見た目も気になりません
- 素材はポリカーボネート(耐衝撃性はプラスチックの30倍程度)ですので、衝撃にも強く安心です

アイカップ滅菌

術後の目をより清潔に保ちます

- エチレンオキシドガス滅菌済みです。
- 単品個装のため、衛生面で安心です。
- 病院等での滅菌作業の手間が省けます。



アイカップ滅菌 8929-01

JANコード / 4990097960140
サイズ / W77×H57mm
重量 / 8g
厚さ / 1.9mm
素材 / □本体:ポリカーボネート
出荷単位 / 1箱(40枚入)
滅菌期限 / 製造日より5年間

アイカップ紐付き

アイカップに使い易さをプラス

- 病院等での紐の取り付け作業が省けます。
- テープで固定する必要がないため、かぶれる心配がありません。
- 紐に付いた留め具をずらすことで長さの調節が可能です。



滅菌情報
アイカップのみ……オートクレープ滅菌
EOガス滅菌共に可
アイカップ+紐……EOガス滅菌のみ可

※留め具部が高温で変形してしまうため
※本商品は未滅菌の状態です。通常ディスプレイでの使用目的の商品ですが、オートクレープ滅菌を行う際は、留め具部分が変形いたしますので、留め具を外して滅菌を行ってください。

アイカップ紐付き 8931-01

JANコード / 4990097959540
サイズ / W77×H57mm
重量 / 9g(紐含む)
厚さ / 1.8mm
素材 / □本体:ポリカーボネート
□紐:ポリエステル+コットン(長さ:47cm結んだ状態)
□ストッパー:ポリスチレン
出荷単位 / 1箱(30枚入)

NEW アイカップ滅菌紐付き

滅菌タイプに紐付きで、清潔・便利

- エチレンオキシドガス滅菌済みです。
- 単品個装のため、衛生面で安心です。
- 病院等での紐の取り付け作業が省けます。
- 病院等での滅菌作業の手間が省けます。
- テープで固定する必要がないため、かぶれる心配がありません。
- 紐に付いた留め具をずらすことで長さの調節が可能です。



ご希望に
お応えして
滅菌
タイプ
新発売
紐も
留め具も
滅菌済

アイカップ滅菌紐付き 8928-01

JANコード / 4990097970552
サイズ / W77×H57mm
重量 / 10g(紐含む)
厚さ / 2.1mm
素材 / □本体:ポリカーボネート
□紐:ポリエステル+コットン(長さ:45cm結んだ状態)
□ストッパー:ポリスチレン
出荷単位 / 1箱(30枚入)
滅菌期限 / 製造日より5年間

アイカップ 紐付き 装着方法



付ける向きはどちらでも構わないですが、細い方を耳側につけるのが一般的です。



耳の後ろで留め具をスライドさせて、長さ調節ができます。



※アイカップの後に保護グラスを掛けられることをおすすめします。