

機械器具 71 視力補正用眼鏡  
一般医療機器 眼鏡 JMDNコード：35065000

## メオガード度付きグラス

### 【形状・構造及び原理等】

眼鏡レンズ1組と眼鏡フレームからなり、本品は視力補正用に用いる。付属品としてヘッドバンドがある。

代表的な基本形状、以下のとおりであり、各種の形状・サイズがある。



レンズ度数：+0.50～+5.00  
-0.50～-9.00

### 【使用目的又は効果】

眼鏡レンズ1組と眼鏡フレームからなる視力補正用眼鏡である。

### 【使用方法等】

- ・ 掛けはずしの際は、両手でテンプルを持って行う。

### 【使用上の注意】

- ・ 眼鏡の掛けはずしは、両手でテンプルを持って顔の正面で行うこと。掛ける際は、目をつく恐れがあるので、テンプルを十分に開いてゆっくり行うこと。
- ・ 形くずれやゆりみの原因になるので、片方のテンプルのみを持って無理にはずさないこと。
- ・ こめかみに当たる部分とパッドはよく拭き取ってから使用すること。
- ・ サウナ等高温になる場所では使用しないこと。
- ・ 整髪料、化粧品がメガネについたときは、劣化・変質・変化の原因となる可能性があるため、すみやかに拭き取ること。
- ・ マスクとの併用は、レンズが曇るおそれがあるので注意すること。
- ・ 眼鏡の掛け具合が悪く、鼻や耳に無理な負担がかかる時は、顔にあうフレームのものを選ぶこと。
- ・ フレームが肌に触れる箇所にかゆみ、かぶれ、湿疹など異常がある時、又は異常が現れたときには眼鏡の使用をやめ、医師に相談すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

- ・ 眼鏡ケースに入れ、直射日光の当たる場所は避けて室内で保管する。
- ・ レンズをキズつける恐れがあるので、硬い金属等と一緒にしないこと。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：名古屋眼鏡株式会社  
TEL：052-261-6561

製造業者：Zhangzhou Tony Optical Co., Ltd.  
(中華人民共和国)