

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 アイパッド JMDNコード：11661000

アイカバーガーゼ滅菌

【形状・構造及び原理等】

ガーゼと眼帯からなる器具である。

【使用目的又は効果】

眼の保護又は分泌物の吸収に用いることを目的としている。

【使用方法等】

袋から取り出し、目に当ててテープで貼ります。

【使用上の注意】

- ・ 患部を清潔にしてパッド部分を汚さないように注意して使用ください。
- ・ 一旦剥がしたものを再度使用しないでください。
- ・ 本品は滅菌製品ですので、開封後は速やかに使用してください。また、使用期限の過ぎたものは、使用しないでください。
- ・ 個包装が破れたり、開けられていたものは、使用しないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：名古屋眼鏡株式会社
TEL：052-261-6561

製造業者：大連新業医療器械有限公司（中華人民共和国）