

メガネフレーム取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
メガネを正しく安全にお使いいただくために、本書を必ずお読み下さい。

⚠️ 注意

■一般フレームの注意事項

- ①各部の素材は経年変化や磨耗、ゆるみなどのため、変色・変形したり、折れたりする場合があります。お買い求め店で1年を目安に定期的に点検を受けて下さい。
- ②ネジがゆるんだり変形した場合は、レンズがはずれる可能性がありますので、使用を中止してお買い求め店で調整して下さい。
- ③パッド（鼻あて）は消耗品です。お買い求め店で1年を目安に点検を受け、必要に応じて交換して下さい。
- ④整髪料、化粧品及び汗がフレームに付着すると劣化、変質、変色の原因となる可能性がありますので、すみやかに拭き取るか水洗いして下さい。
- ⑤レンズを拭く時は、拭く方のレンズの外側を持ってそっと拭いてください。無理に力を入れると、素材の劣化によるリム折れの原因となります。縁なしフレーム、溝掘りフレームも同様に扱って下さい。
- ⑥故意に変形、改造したり、キズを付けないでください。素材の劣化により折れの原因となります。
- ⑦保護メガネとしては使用出来ません。激しい衝撃を受ける可能性がある場合は、使用しないで下さい。破損により顔面を負傷する危険性があります。
- ⑧フレームは分解しないで下さい。幼児の手の届かない所に保管して下さい。
- ⑨メガネを掛ける場合、目をつく恐れがありますので temples を十分に開いてゆっくり掛けて下さい。
- ⑩サウナ等の高温になる場所で使用しないで下さい。

⚠️ 警告

■素材特性による注意事項

- ①セルロイドやプラスチックを使用しているフレームは、約170℃で燃え出します。サウナ・ドライヤー・ストーブなど熱を発生している付近、又夏の車中にも放置しないで下さい。

⚠️ 注意

■形態による注意事項

- ①溝掘りフレーム
 - ・ナイロン糸でレンズをつりさげる構造の溝掘りフレームは、ナイロン糸の劣化により、糸が切れてレンズがはずれることがあります。糸は消耗品ですので、お買い求め店で1年を目安に点検を受け、必要に応じて糸の交換を行って下さい。
 - ・ナイロン糸は、熱、衝撃などにより切れることがあります。火のそばに置いたり、ぶついたりしないで下さい。
- ②縁なしフレーム（ツーポイントフレーム）
 - ・レンズに穴をあけて固定する縁なしフレームは、構造上ネジのゆるみや枠が変形しやすいフレームです。1年を目安にお買い求め店で点検を受けて下さい。
 - ・縁なしフレームは、レンズの外周が剥き出しになっていることと、レンズに穴をあけているため、リム（レンズ縁）のあるフレームと比較して、レンズ割れの可能性が高いフレームです。取り扱いには注意して下さい。

⚠️ 注意

■アレルギー体質の方へ

- ①フレームが肌に触れる箇所にかゆみ、かぶれ、湿疹などの異常があらわれた時にはご使用をやめ、医師の診断を受けて下さい。体質にあった部品又はフレームと交換することが必要です。
- ②フレームは経年変化によって、表面層のはがれやヒビ割れによる、素材の露出や変色が起こる場合があります。そのままお使いになると、アレルギーを起こす可能性があります。一年を目安にお買い求め店で点検を受けて下さい。

名古屋眼鏡株式会社

〒460-0007 名古屋市中区新栄1-35-19 TEL03-5649-8010、052-261-6561